



CB 27 Adhesive remover



CB 27 – instrument din carbura de tungsten destinat special indepartarii rapide si sigure a reziduurilor de adeziv

După finalizarea tratamentului ortodontic cu bracket-uri, puteți elimina rapid reziduurile de adeziv fără a deteriora smaltul dinților, folosind acest instrument special. Acest lucru este posibil datorită lamelelor răsucite ale partii active ale instrumentului realizate

din materiale speciale, rezistente din carbura de tungsten, care pot asigura o operare fina si un tratament confortabil. Varful inactiv cu lamele netaietoare minimizeaza riscul deteriorarii gingiei.

Recomandari de utilizare:

- A se utiliza in piesa contraunghi la o turatie optima de 40.000 rpm.
- Aplicati o presiune de contact scazuta si o racire suficienta.
- Pentru a nu obstructiona vederea, se poate folosi un spray de aer puternic în locul celui cu apa
- Dupa indepartarea completa a reziduurilor de adeziv, smaltul va avea o stralucire naturala



CB 27



REF	CB 27
ISO	500.204.194.XXX... 016

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH
Goerzallee 307
14167 Berlin · Germany

fon + 49 [0] 30 8 47 29 6 - 0
fax + 49 [0] 30 8 47 29 6 - 25
e-mail: info@drendel.de
www.drendel.de